



Orthèse stabilisatrice de cheville Salvacast Evolutive

Cette orthèse permet le maintien et la stabilisation de la cheville. Elle accompagne la guérison en offrant deux modes d'immobilisation :



- Stabilisation renforcée, avec la sangle de renfort et les ergots amovibles pour les premiers jours et le port de nuit. Ce système exerce volontairement une stabilisation plus puissante

pour limiter tout mouvement de torsion et maintenir le ligament traumatisé en position de cicatrisation.



- Stabilisation classique en retirant la sangle de renfort et les ergots amovibles lorsque les symptômes ont diminué. Le pied est ainsi totalement libéré dans le sens de la marche.

Le port de cette orthèse est compatible avec l'utilisation d'un coussin thermique **ACTIPOCHE** petit modèle (non fourni) pendant les premiers jours pour bénéficier de la cryothérapie. Inséré dans sa housse, il sera placé au niveau de la lésion. Se référer à la notice **ACTIPOCHE** petit modèle avant utilisation.

INDICATIONS :

Traumatismes et entorses, avérés, récents de la cheville, de gravité moyenne ou sévère après évaluation rigoureuse (traitement fonctionnel ou post-opératoire, ou en rééducation). Les instabilités de la cheville d'origine nerveuse et les instabilités non traumatiques sont exclues.

L'attelle Salvacast Evolutive, avec ergots et sangle de renfort, peut être utilisée en première intention lors des entorses moyennes ou sévères. Selon les critères cliniques (diminution de la douleur, œdème...) et/ou l'avis du médecin elle pourra ensuite évoluer vers une « attelle simple » en retirant ergots et sangle pour libérer totalement le pied dans le sens de la marche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :


Suivre les instructions et conseils donnés par votre médecin traitant ou votre pharmacien. Ne pas utiliser dans les cas d'instabilité de la cheville d'origine non traumatique ou les instabilités de la cheville d'origine nerveuse. En cas de diabète ou d'insuffisance vasculaire, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Il est vivement conseillé de porter l'orthèse dans une chaussure à lacets (pour une réduction complète des mouvements d'inversion et d'éversion) et sur une chaussette, en coton de préférence, suffisamment haute pour couvrir complètement la zone en contact avec l'orthèse. En cas d'irritation cutanée ou de signe d'allergie, demander un avis médical.

MISE EN PLACE :

1. Ouvrir l'orthèse et poser le talon sur la talonnette. Plaquer les coques de chaque côté de la jambe.
2. Entourer le mollet en passant les sangles à flèche orange dans leur boucle. Ajuster le serrage pour un maintien ferme mais confortable. Ajuster la largeur de la talonnette en tirant sur les languettes auto-agrippantes de chaque côté de la cheville.
3. **Clipser la sangle amovible** (à flèche blanche) **sur la cheville du côté de l'entorse** en l'orientant vers le dessus du pied.
4. Passer la sangle sous la voûte plantaire en recouvrant les ergots latéraux à flèche blanche.
5. Croiser la sangle sur le coup de pied en veillant à assurer une tension suffisante et faire le tour de la cheville.

Retrouvez nos conseils de mise en place en vidéo

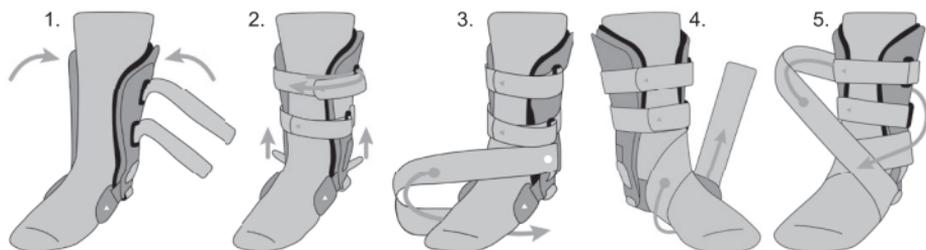

Pour une utilisation sans sangle de renfort, la retirer ainsi que les deux ergots latéraux à flèche blanche.

ENTRETIEN :

Lavage à la main, à l'eau savonneuse uniquement, sans détergeant ni eau de javel.
Séchage à plat loin d'une source de chaleur.



CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stocker dans l'étui, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

COMPOSITION :

Coques : Polyamide 100%.

Textile : Polyamide 49%, Polyuréthane 25%, Polyester 19%, Autres fibres 7%.



Fabricant :
Coopération Pharmaceutique Française
Place Lucien Auvert - 77020 Melun cédex - FRANCE

CE
Année de marquage CE : 2016
Photos non contractuelles
8082309/00 Avril 2016